

ChitoSAM™100

SAM[®]
MEDICAL

100 % CHITOSANOVÉ HEMOSTATICKÉ KRYTIE

LEN NA DOČASNÉ VONKAJŠIE POUŽITIE

Na kontrolu stredne silného až silného krvácania a ošetrenie vonkajších odrenín, tržných rán.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Použite vhodnú veľkosť a počet krytí podľa plochy rany a intenzity krvácania.
2. Krytie priložte priamo na ranu.
3. Krvácanie kontrolujte silným tlakom po dobu 3 minút. Zabezpečte vhodným krycím krytím a udržiavajte tlak na ranu.

UPOZORNENIE/VAROVANIE:

Neumiestňujte na oči.
Obsahuje chitosan z mäkkýšov.

Pri odstraňovaní krytia z rany použite sterilný fyziologický roztok alebo vodu, aby ste opláchli zvyšky krytia.

VAROVANIE:

Ak máte obavy z alergie na mäkkýše, poraďte sa so svojim lekárom.

Krytie sa musí odstrániť do 24 hodín.

- Nie je vyrobené s použitím prírodného kaučukového latexu
- Nesterilizujte opakovane
- Nepoužívajte opakovane
- Nepoužívajte, ak je obal poškodený alebo otvorený

REF	CT101-A-EN / 10 cm × 10 cm (4" × 4") Jednovrstvové hemostatické krytie
REF	CT101-B-EN / 7,6 cm × 1,22 m (3" × 4') Skladané hemostatické krytie tvaru Z
REF	CT101-C-EN / 7,6 cm × 1,83 m (3" × 6') Skladané hemostatické krytie tvaru Z

VYROBENÉ NA TAIWANE

Vyrába spoločnosť
BenQ Materials Corporation
29, Jianguo E. Road, Gueishan Taoyuan,
Taiwan, Čínska ľudová republika
+886 3 374 8800
benqmaterials.com

CE 2460

EC REP

Obelis S.A, Bd. Général Wahis, 53,
1030 Brusel, Belgicko

Distribuuje spoločnosť:
SAM Medical Products®
12200 SW Tualatin Rd, Ste 200
Tualatin, OR 97062 USA
+1 503 639 5474

sammedical.com

SLOVNÍK SYMBOLOV

Výrobca	
Č. šarže	
Katalógové číslo	
Nepoužívajte opakovane	
Nepoužívajte, ak je obal poškodený	
Nesterilizujte opakovane	
Nie je vyrobené s použitím prírodného kaučukového latexu	
Rozsah teplôt	15°C - 35°C
Sterilizované ožarovaním	
Dátum spotreby	
Udržujte v suchu	
Oprávnený zástupca v Európskom spoločenstve	
Zdravotnícka pomôcka	
Uchovávajte mimo dosahu slnečného svetla	
Označenie CE	
Dovozca	

CT-US-SK-1
DÁTUM VYDANIA: 06/2021